

1. Naam van het product

Southpaw ophangstelsysteem - hoogteversneller

2. Product code

13626652

3. Kleur

Zwart



4. Korte omschrijving

Met deze versteller kun je de gewenste hoogte van het onderdeel bepalen. Het handige mechanisme is snel los te maken en verplaatst zich soepel langs het therapietouw. Met een knipslot (inbegrepen) kun je de toestellen aan de hoogteversteller bevestigen.

5. Inhoud

- 1 x Southpaw ophangstelsysteem – hoogteversneller
- 1 x knipslot

6. Zintuigen stimulaties

Vestibulair (balans)


7. In gebruik nemen

Stap 1: Duw de veiligheidsdrukker in om het aan het touw te bevestigen (zie afbeelding 1).


Stap 2: Het touw glijdt hier naar binnen (zie afbeelding 2).

Stap 3: Om de hoogteversneller omhoog te brengen, houd je de kabel onder het lichaam ingedrukt en duw je de hoogteversneller omhoog tot de gewenste hoogte (zie afbeelding 3).


Stap 4: Om de hoogteversneller naar beneden te brengen, ontgrendel je de vergrendeling op het touw onder de hoogteversneller. Duw de veiligheidsdrukker omhoog terwijl je opwaartse druk uitoefent op de hoogteaanpassing. Hierdoor wordt hij ontgrendeld en kun je de hoogteversneller naar gewenste hoogte verplaatsen.

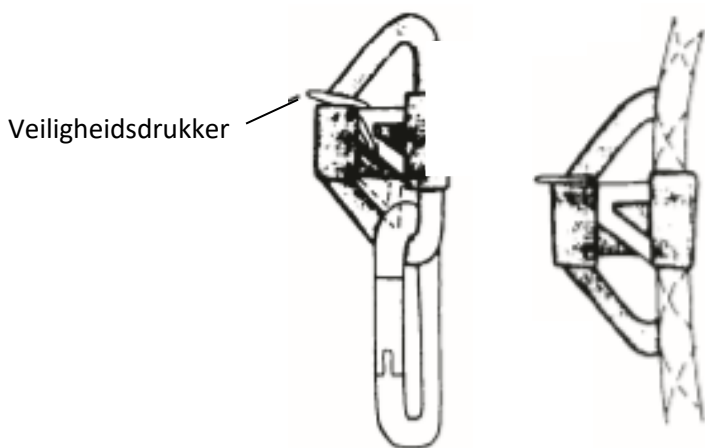

Figuur 1

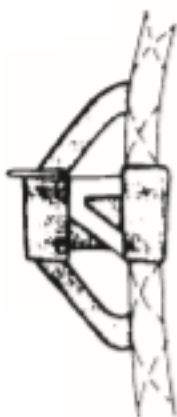

Figuur 2

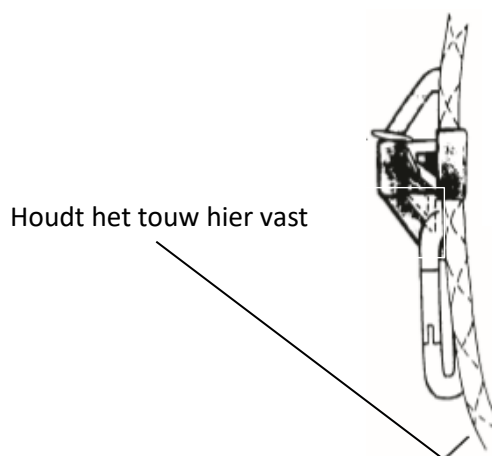

Figuur 3



8. Technische informatie

Maximale belasting: 450 kg

9. Maandelijkse checks

- Controleer of het veiligheidsslot nog compleet/heel is.
- Controleer het touw op ontbrekende/losse steken.
- Controleer of het knipslot goed sluit.
- Controleer de veer in de hoogteversneller.

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

