



1. Naam van het product

Southpaw platformschommel

2. Product code

13724065

3. Kleur

Zoals afgebeeld.



4. Korte omschrijving

De Platformschommel van Southpaw is een veelzijdige en betrouwbare sensorische schommel die onmisbaar is in elke snoezel- of therapieruimte. Deze stevige schommel ondersteunt kinderen en volwassenen bij het ontwikkelen van balans, coördinatie en sensorische integratie en is ideaal voor gebruik in zorginstellingen, scholen of thuis.

5. Inhoud

- 1 × Southpaw platformschommel
- 1 × Tapijt
- 1x Veiligheidskarabijnhaak
- 1 × Instructieblad
- 1 × Onderhoudschecklist
- 1 × Instructieblad veiligheidskarabijnhaak

6. Belangrijke informatie

6.1 Minimale hoogte en benodigde ruimte

De minimaal vereiste hoogte is 8 ft (± 2,44 meter).

Zorg ervoor dat er minimaal 6 ft (± 1,83 meter) vrije ruimte is tot muren en andere obstakels.

6.2 Hoogteversteller en veiligheidsdraaikoppeling nodig

Het gebruik van de Southpaw 5000 hoogteversteller wordt aanbevolen om de hoogte van het materiaal eenvoudig aan te passen.

Een Southpaw 2000 veiligheidsdraaikoppeling dient te worden gebruikt om schade aan het materiaal te voorkomen.

WERKLAAT: 300 lbs (± 136 kg)

6.3 Ophangprocedure

Hang de platformswing op door de veiligheidskarabijnhaak aan de bovenzijde van de swing te bevestigen aan het hoogteverstellingssysteem.



Doordat vier stabilisatielijnen zijn verbonden met de hoofdophanglijn, blijft het platform relatief stabiel.

Voor een volledige bewegingsvrijheid kunt u één of meerdere stabilisatielijnen loskoppelen van de hoofdophanglijn.



Speciale opmerking: Breng af en toe een beetje vet aan op de U-bout (bovenkant van de schijf) om geluid te voorkomen.

Let op: De rand is gevoerd, maar kan toch een flinke stoot geven als u niet voorzichtig bent.

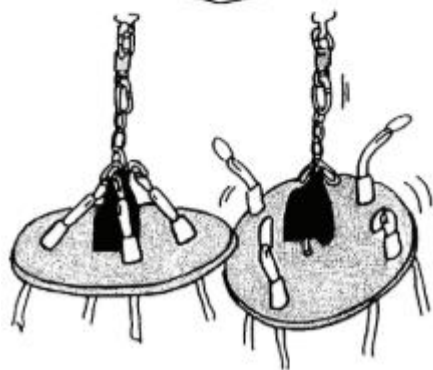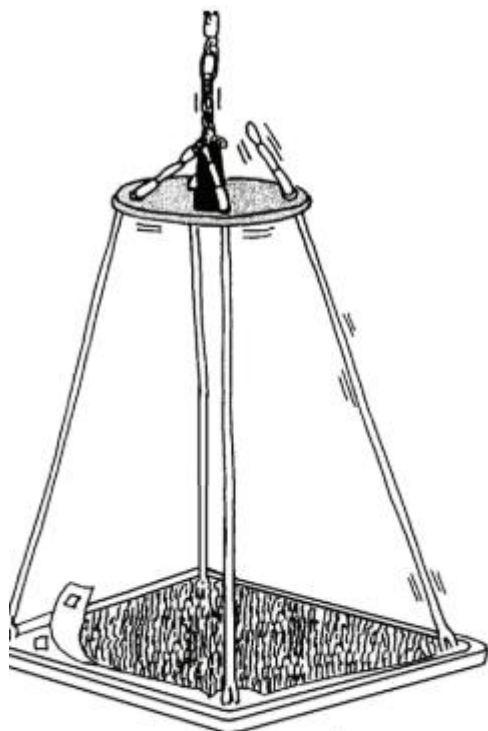



7. Onderhoudschecklist

Controleer de onderstaande slijtagepunten maandelijks en noteer dit op de bijgevoegde checklist:

- Controleer de ketting en de veiligheidskarabijnhaak op slijtage (zie instructieblad veiligheidskarabijnhaak). Controleer ook de schroefbare kettingschakels nabij de veiligheidskarabijnhaak waaraan de stabilisatielijnen zijn bevestigd. Zorg ervoor dat de schroefsluiting goed is aangedraaid.
- Controleer de U-bout onder de zwarte beschermhoes op slijtage. Als de slijtage meer dan 30% van de diameter van de bout bedraagt, het product niet meer gebruiken.
- Controleer de touwen op losse of ontbrekende splice locks.* Als er losse of ontbrekende splice locks worden aangetroffen, het product niet gebruiken totdat dit is gerepareerd.
- Controleer het hout op scheuren of splinters. Bij scheuren het product niet meer gebruiken. Bij splinters glad schuren.
- Controleer of de randbescherming stevig vastzit.
- Een splice lock is de metalen clip nabij het uiteinde van de touwen.

8. Opslagvoorschriften

- Opslaan buiten direct zonlicht.
- Opslaan op een plaats waar cliënten er niet zonder deskundig toezicht bij kunnen.

9. Onderhoud

- Controleer vooraf of cliënten allergieën hebben.
- Overleg met de afdeling infectiepreventie voordat u deze procedures toepast.
- Afstoffen of afnemen met een licht vochtige doek.
- Tapijt stofzuigen. Het tapijt kan worden gereinigd met schuimtapijtreiniger. Het tapijt is niet machine wasbaar.

10. Veiligheid

- ♦ Controleer het plafond-oogbout op slijtage en beweging. Gebruik een Southpaw veiligheidsdraaikoppeling om abnormale slijtage te voorkomen.
- ♦ Plaats vloermatten van de juiste dikte correct onder en rondom alle opgehangen materialen.

De veiligheid van uw cliënten is afhankelijk van het kiezen van passende activiteiten die aansluiten bij, maar ook een uitdaging vormen voor, hun lichamelijke mogelijkheden. Pas altijd geschikte begeleidings- en veiligheidstechnieken toe. Daarnaast zijn de inrichting van de ruimte, een correcte installatie en goed onderhoud van het materiaal van essentieel belang.

Southpaw-apparatuur is niet bedoeld voor recreatief of buitengebruik. Onder geen enkele voorwaarde mag dit materiaal worden gebruikt zonder deskundig toezicht.

Dit document dient uitsluitend als voorbeeld en is niet bedoeld ter vervanging van lokale, regionale of nationale wet- en regelgeving. Houd er rekening mee dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om alle relevante veiligheidsinformatie te verzamelen die van toepassing is op uw organisatie.

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

