



1. Naam van het product

Southpaw zweefschommel standaard

2. Product code

14519065

3. Korte omschrijving

De Southpaw zweefschommel is een veelzijdig therapeutisch hulpmiddel dat vestibulaire stimulatie biedt en helpt bij het verbeteren van evenwicht, gewichtsverplaatsing en bilaterale coördinatie.



4. Inhoud

- 1 Southpaw zweefschommel met bescherming
- 1 tapijt met klittenband aan de onderkant
- 2 knipslot
- 1 set trekhandgrepen
- 1 handleiding voor veiligheidssnap
- 1 handleiding voor trekhandgrepen
- 1 onderhoudschecklist
- 1 instructieblad

Belangrijk: Houd alle onderdelen bij elkaar.

5. In gebruik nemen

Minimale hoogte en benodigde ruimte

- Minimale hoogte: 2,44 m (8 voet)
- Benodigde ruimte: Zorg voor een vrije ruimte van 1,83 m (6 voet) rondom muren en obstakels

Benodigde accessoires

- Aanbevolen: Southpaw Hoogteversteller (13626652) – niet inbegrepen
- **Verplicht** bij ophanging aan één punt: Southpaw Veiligheidsrotatieapparaat (13738652) in combinatie met Southpaw ophangstelsel - hoogteversteller (13626652)

Ophangprocedures

- Bevestig de zweefschommel aan de oogbouten met de meegeleverde veiligheidsskarabijnhaken.
- **Ophanging aan twee punten:**
 - Standaard: ophangpunten 1,07 m – 1,37 m uit elkaar
 - Groot: ophangpunten 1,37 m – 1,68 m uit elkaar
- **Ophanging aan vier punten:**
 - Om zweefschommel aan vier punten op te hangen, heeft u twee extra Safety Snaps nodig.
Bij de zweefschommel – standaard (14519065) moeten de eerste ophangpunten 107 tot 137 cm uit elkaar liggen. De tweede set ophangpunten plaatst u parallel aan de eerste, op een afstand van 30 tot 60 cm.
Voor de zweefschommel – groot (29238065) geldt dat de ophangpunten 137 tot 168





cm uit elkaar moeten liggen, met ook hier de tweede set parallel aan de eerste.

- **Ophanging aan één punt:**
 - Altijd een Southpaw Veiligheidsrotatieapparaat (13738652) gebruiken om schade door draaien te voorkomen

6. Onderhoud

Controleer maandelijks en noteer op de checklist:

- knipslot op slijtage
- Touwen op losse of ontbrekende klemmen (metaalstuk bij de uiteinden)
- Oogbout in plafond op slijtage en beweging
- Voldoende en correct geplaatste vloermatten
- Touwen op slijtage bij boven- en onderkant
- Houten onderdelen op splinters of beschadiging
- Klittenband op tapijt en bord
- Randbescherming op juiste bevestiging

Opslag

- Buiten direct zonlicht bewaren
- Uit de buurt van chemicaliën en schoonmaakmiddelen
- Niet toegankelijk voor cliënten zonder toezicht
- Niet op de rand opslaan (beschadigt rand)

Reiniging

- Raadpleeg infectiepreventieafdeling vóór gebruik van schoonmaakmethodes
- Controleer op allergieën bij cliënten
- Vinyl reinigen met vochtige doek en zeep/desinfectiemiddel, daarna drogen
- Tapijt regelmatig stofzuigen en reinigen met schuimtapijtreiniger
- Tapijt is niet machine wasbaar en mag niet ondergedompeld worden in water

7. Veiligheid

De veiligheid van uw cliënten is afhankelijk van het zorgvuldig kiezen van activiteiten die aansluiten bij, maar ook een uitdaging vormen voor hun fysieke mogelijkheden.

Gebruik altijd de juiste opvang- en veiligheidstechnieken. Daarnaast zijn de indeling van de ruimte, een correcte installatie en regelmatig onderhoud van uw apparatuur van cruciaal belang.

Southpaw-apparatuur is niet bedoeld voor recreatief of buitengebruik. Onder geen beding mag deze apparatuur worden gebruikt zonder toezicht.

Dit document dient slechts als voorbeeld en vervangt op geen enkele manier de lokale, provinciale, nationale of internationale veiligheidsnormen. Houd er rekening mee dat het uw verantwoordelijkheid is om alle relevante veiligheidsinformatie te verzamelen die van toepassing is op uw locatie.

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

