



1. Naam van het product

Southpaw Zitschommel & voetensteun

2. Product code

15628065

3. Kleur

Zoals afgebeeld



4. Korte omschrijving

Beweging naar veel verschillende kanten. Voor schommelbewegingen in elke gewenste richting en/of ronddraaien met behulp van een draaikoppeling (vereist, niet inbegrepen). Deze schommelzit is comfortabel in zittende tot liggende positie. De lichtgewicht aluminium voetensteun is volledig verstelbaar en ondersteunt voeten en benen. Een knipslot is inbegrepen. Maximale belasting 90 kg. Afmeting zitje 105 x 58 cm.

5. Technische informatie

- Maximale belasting: 90 kg
- Minimale hoogtevereiste en ruimte nodig: 2,5 m
- Southpaw Zitschommel & voetensteun moet maximaal 2 meter verwijderd zijn van alle muren en andere obstakels.

6. In gebruik nemen

Hangband

Als de ophangriem losraakt tijdens het transport of als deze wordt verwijderd voor reiniging, bevestigt u deze als volgt aan de schommel: Wikkel de riem, maak twee keer een band rond de bovenkant van het aluminiumframe, waarbij beide uiteinden van de band onder het andere uiteinde worden gelust. Bevestig vervolgens de veiligheidsklem aan de riem. Op dit punt moet het weefsel onder belasting strak rond het frame worden getrokken.

Om de hoek van de schommeling aan te passen:

Verwijder eerst de cliënt uit de schommel. Maak vervolgens de knoppen van de positioneringsplaat aan de zijkanen van de zitschommel los tot de tanden van de platen schakelen. Draai de hoek van de stoel in de gewenste positie en draai de knoppen vast totdat de tanden van de positioneerplaten volledig vastklikken. Maak de knoppen niet meer los dan nodig is om de zitschommel in te stellen.

Nadat u de swing in de juiste positie hebt ingesteld, kunt u extra stabiliteit aan de stoel toevoegen door de koorden aan de buitenlus van het frame te binden.





7. Veiligheid

Belangrijk

- Stel nooit de hoek van de schommel in terwijl ene cliënt in de schommel zit. Dit kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
- Gebruik de schommel nooit zonder het meegeleverde veiligheidssysteem.
- Laat cliënten nooit onbeheerd achter in de zitschommel.
- Gebruik de schommel nooit zonder een veiligheidsrotatie-inrichting. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot catastrofaal falen van de schommel
- Voordat u een cliënt in de schommel legt, hangt u de schommel en zorgt u ervoor dat de hangende riem op zijn plaats zit en vastzit. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

8. Onderhoud

- Controleer eerst op de allergie op de cliënt.
- Controleer met uw dienst infecties ziekte alvorens deze procedures te gebruiken.
- De schommel is koud wasbaar, mild te wassen met water.
- Laat de schommel drogen in de lucht (niet met een droogtrommel, de dekking zal smelten in de droger).
- Maak de frame met een vochtige doek met zeep en water of desinfectiemiddel schoon.

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken.

