



## 1. Naam van het product

Southpaw bolsterschommel

## 2. Product code

17680065

## 3. Kleur

Zoals afgebeeld.



## 4. Korte omschrijving

De Bolsterschommel is een van de eerste keuzes van therapeuten en ergotherapeuten voor het trainen van houding, balans en lichaamsbewustzijn. Deze veelzijdige therapieschommel kan op verschillende manieren worden ingezet en daagt cliënten uit om actief hun evenwicht te bewaren, wat bijdraagt aan kracht, coördinatie en motorische planning.

## 5. Inhoud

- 1 × Bolsterschommel
- 1 × Veiligheidskarabijnhaak (Safety Snap)
- 1 × Instructieblad
- 1 × Onderhoudschecklist
- 1 × Instructieblad veiligheidskarabijnhaak

## 6. Belangrijke informatie

### 6.1 Minimale hoogte en benodigde ruimte

Kan worden gebruikt bij een plafondhoogte van 2,4 meter (8 ft).

Waarschuwing: Het niet correct installeren van een gesmede stalen oogbout (1/2" of 5/8") kan leiden tot ernstig letsel of overlijden. Heeft u vragen over de installatie van de gesmede stalen oogbout, neem dan contact op met de klantenservice van Nenke

Houd altijd een vrije afstand van minimaal 1,8 meter (6 ft) tot muren en andere obstakels.

### 6.2 Benodigde hoogteversteller en draaikoppeling

- Voor eenvoudig verstellen wordt een hoogteversteller (onderdeel nr. 13626652) aanbevolen.
- Een veiligheids-draaikoppeling (onderdeel nr. 13738652) **moet** worden gebruikt om schade aan de apparatuur te voorkomen.

**Maximale werklast:** 136 kg (300 lb)

### 6.3 Ophangprocedure

Bevestig de veiligheidskarabijnhaak bovenaan de bolster aan een draaikoppeling en vervolgens aan het ophangpunt. Uw bolsterschommel is nu klaar voor gebruik.





## 7. Onderhoudschecklist

Controleer de onderstaande slijtagepunten maandelijks en noteer dit op de bijgevoegde checklist:

- Controleer de touwen op rafelen (controleer ook het uiteinde van het touw onder de zwarte beschermhoes).
- Controleer alle veiligheidskarabijnhaken op slijtage. Raadpleeg het instructieblad van de veiligheidskarabijnhaak voor een gedetailleerde onderhoudschecklist.
- Controleer de touwen op losse of ontbrekende metalen kabelklemmen. Indien aanwezig: gebruik direct staken.
- Controleer de stang op scheuren of splinters. Bij scheuren: gebruik staken. Bij splinters: schuren tot glad en afwerken met blanke lak.

## 8. Onderhoud

### Opslag

- Bewaar uit direct zonlicht.
- Bewaar op een plek die niet toegankelijk is voor cliënten zonder passend toezicht.

### Reinigingsinstructies

- Controleer eerst of cliënten allergieën hebben.
- Raadpleeg uw afdeling infectiepreventie voordat u deze procedures toepast.
- Reinig met een vochtige doek en milde zeep. Laat volledig drogen vóór gebruik.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.

### Let op

- Controleer de plafond-oogbout op slijtage en beweging. Gebruik een Southpaw veiligheidsdraaikoppeling om abnormale slijtage te voorkomen.
- Plaats vloermatten van de juiste dikte correct onder en rondom alle hangende apparatuur.

## 9. Veiligheid

De veiligheid van uw cliënten hangt af van het kiezen van activiteiten die passen bij, maar ook uitdagen, hun fysieke mogelijkheden. Pas geschikte begeleidings- en veiligheidstechnieken toe. Daarnaast zijn de indeling van de activiteitenruimte en de juiste installatie en het onderhoud van de apparatuur cruciaal. Southpaw-apparatuur is niet bedoeld voor recreatief of buitengebruik. Deze apparatuur mag onder geen enkele omstandigheid worden gebruikt zonder adequaat toezicht.

Dit document is uitsluitend bedoeld als voorbeeld en vervangt op geen enkele wijze lokale, provinciale, landelijke of federale normen. Het is uw verantwoordelijkheid om alle relevante veiligheidsinformatie te verzamelen die van toepassing is op uw locatie.

Voor meer informatie, bezoek onze website [www.nenko.nl](http://www.nenko.nl) / [www.nenko.be](http://www.nenko.be)