



1. Naam van het product

Southpaw rolschommel

2. Product code

17680065

3. Kleur

Zoals afgebeeld



4. Korte omschrijving

De populaire rolschommel is vaak de eerste keus bij therapeuten. Deze gestroomlijnde versie is een economische opstarter. Met minder kenmerken dan de Southpaw rolschommel en pony rolschommel, maar ook een lagere prijs! De draaikoppeling dient apart besteld te worden.

5. Inhoud

- 1 x Southpaw rolschommel
- 1 x knipslot

6. Zintuigstimulaties

Vestibulair (balans)

7. In gebruik nemen

Stap 1: Hang de platformschommel op door het knipslot te koppelen met de schommel en het ophangpunt.

Stap 2: De schommel is nu klaar voor gebruik.

8. Aanvullende informatie

- Zorg dat de platformschommel niet de hele dag in het zonlicht hangt.
- Zorg dat er constant iemand aanwezig is die toezicht houdt op de schommel (wanneer de schommel in gebruik is).

Maandelijkse checks:

- Controleer of de touwen zijn gerafeld (vooral aan het uiteinde van het touw)
- Controleer de veiligheidsknoppen op slijtage.
- Controleer het hout op scheuren of splinters.
- Tref je een van de bovenstaande situaties aan? Stop met het gebruiken van de schommel en laat het repareren.

9. Technische informatie

Maximale belasting: 160 kg

Afmeting: 120 cm lang

10. Onderhoud

Stap 1: Maak de schommel schoon met water en een sopje.

Stap 2: Droog de schommel weer voor gebruik.

Gebruik géén schuurmiddelen voor het onderhoud!

Voor meer informatie kun je onze website www.nenko.nl bezoeken.

