



1. Naam van het product

Southpaw Cocoon schommel

2. Product code

18720065

3. Korte omschrijving

De Southpaw Cocoon schommel is een innovatieve sensorische schommel van Southpaw, speciaal ontwikkeld voor kinderen die behoefte hebben aan sensorische stimulatie, ontspanning en geborgenheid. Dankzij het slimme ontwerp biedt deze schommel zowel plezier als therapeutische voordelen, en is hij ideaal voor gebruik in scholen, therapieruimtes, snoezelruimtes en ziekenhuizen.

4. Inhoud

- 1x Southpaw Cocoon schommel
- 1x stabilisatiebord
- 1x knipslot (safety snap)
- 1x instructieblad Safety Snap
- 1x onderhoudschecklist
- 1x instructieblad

5. In gebruik nemen

Werklast: 90 kg (200 lbs)

Ophanginstructies:

- Bevestig de veiligheidssluiting aan de lussen bovenop de Cocoon Schommel en maak de veiligheidssluiting vervolgens vast aan het ophangpunt.
- Met de Southpaw Hoogteversteller (13626652) kunt u de hoogte van het apparaat eenvoudig aanpassen aan uw behoeften.
- De Cocoon Schommel kan worden gevuld met verschillende soorten materiaal, zoals ballen of andere geschikte vullingen.

Waarschuwing: Het niet correct installeren van een gesmede stalen oogbout (1/2" of 5/8") kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Neem bij vragen over de installatie van de gesmede stalen oogbout contact op met ons.

6. Onderhoud

Controleer maandelijks en noteer op de checklist:

- Controleer op gescheurde naden of losse stiksels. Indien aanwezig: stop het gebruik totdat reparatie heeft plaatsgevonden.
- Controleer houten onderdelen op scheuren en splinters. Indien scheuren aanwezig zijn: stop het gebruik totdat reparatie heeft plaatsgevonden. Schuur splinters glad.

Matten – voorzorgsmaatregelen:

Gebruik altijd geschikte valmatten onder en rondom hangend materiaal.



Opslag

- Bewaar buiten direct zonlicht.
- Bewaar op een plaats die niet toegankelijk is voor cliënten zonder de juiste begeleiding.

Reiniging

- Raadpleeg uw afdeling infectiepreventie voordat u deze procedures toepast.
- Controleer eerst of de cliënt geen allergieën heeft.
- Nadat alle houten onderdelen zijn verwijderd, kan de stof in de wasmachine worden gewassen met koud water en mild wasmiddel. Zie de achterzijde voor instructies om het hout uit de stof te verwijderen.
- Drogen in de droger op lage temperatuur.

Om de hoes te verwijderen:

- Open de opening van de schommel en keer het bovenste gedeelte binnenstebuiten.
- Zoek de opening in de paarse stof, op de overgang tussen de paarse en de zwarte stof.
- Verwijder de schroef en ringen die de twee uiteinden van het ronde houten onderdeel bij elkaar houden met een **7/32" inbussleutel**.
- Schuif het ronde houten onderdeel uit de stof.

Om de hoes terug te plaatsen:

- Open de opening van de schommel en keer het bovenste gedeelte binnenstebuiten.
- Zoek de opening in de paarse stof, op de overgang tussen de paarse en de zwarte stof.
- Schuif één uiteinde van het ronde houten onderdeel in de opening van de paarse stof, op de overgang tussen de paarse en de zwarte stof.
- **Let op:** één uiteinde van de houten cirkel heeft een schroefinzetstuk. Dit inzetstuk heeft aan één kant een "ring" (**fig. 1**). De schroef gaat in de tegenoverliggende kant, dus niet aan de kant met de ring.
- Wanneer u de houten cirkel in de stof schuift, zorg er dan voor dat de ring naar de zwarte stof toe gericht is. Schuif de stof rondom de houten cirkel totdat beide uiteinden bij de opening uitkomen (**fig. 2**).
- Plaats eerst de veerring en daarna de platte ring op de schroef. Steek de schroef in het gat zonder schroefinzetstuk. Overlap de uiteinden van het hout totdat de gaten op één lijn liggen en draai de schroef stevig in het schroefinzetstuk vast (**fig. 3**).
- Keer de stof weer terug naar de juiste kant en hang de schommel op.

Figure 1



Figure 2



Figure 3



7. Veiligheid

De veiligheid van uw cliënten is afhankelijk van het zorgvuldig kiezen van activiteiten die aansluiten bij, maar ook een uitdaging vormen voor hun fysieke mogelijkheden.



Gebruik altijd de juiste opvang- en veiligheidstechnieken. Daarnaast zijn de indeling van de ruimte, een correcte installatie en regelmatig onderhoud van uw apparatuur van cruciaal belang.

Southpaw-apparatuur is niet bedoeld voor recreatief of buitengebruik. Onder geen beding mag deze apparatuur worden gebruikt zonder toezicht.

Dit document dient slechts als voorbeeld en vervangt op geen enkele manier de lokale, provinciale, nationale of internationale veiligheidsnormen. Houd er rekening mee dat het uw verantwoordelijkheid is om alle relevante veiligheidsinformatie te verzamelen die van toepassing is op uw locatie.

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

