



1. Naam van het product

Southpaw T-schommel

2. Product code

20529065

3. Korte omschrijving

De Southpaw T-schommel is een veelzijdig en uitdagend hulpmiddel dat speciaal is ontworpen voor de meer actieve doelgroep. Het biedt een uitstekende manier om evenwicht, bilaterale kracht en coördinatie te verbeteren, terwijl tegelijkertijd vestibulaire input wordt gegeven.



4. Inhoud

- 1x Southpaw T-schommel (volledig gemonteerd)
- 1x onderhoudschecklist
- 1x trekklus
- 1x instructieblad

5. In gebruik nemen

Minimale hoogte en benodigde ruimte:

De minimale vereiste plafondhoogte is **2,4 meter**. Houd altijd **1,8 meter vrije ruimte** aan tussen de schommel en muren of andere obstakels.

Benodigde veiligheidsaccessoires:

Voor het ophangen van dit apparaat is het gebruik van de **Southpaw ophangstelsel - knipslot (13799652)** verplicht.

Daarnaast moet een **Southpaw ophangstelsel - draaikoppeling (13738652)** worden gebruikt om schade aan de kabel van de Southpaw T-schommel te voorkomen.

Werklast: 159 kg (350 lbs)

Ophanginstructie:

- Steek een **Southpaw ophangstelsel - knipslot (13799652)** door de metalen, met draad omvlochten lus bovenop de T-Bar.
- Hang de T-schommel met het knipslot aan het ophangstelsel en gebruik daarbij altijd een Southpaw ophangstelsel - draaikoppeling (13738652).

Waarschuwing: Het niet correct installeren van een gesmede stalen oogbout (1/2" of 5/8") kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Neem bij vragen over de installatie van de gesmede stalen oogbout contact op met ons.





6. Onderhoud

Controleer maandelijks en noteer op de checklist:

- Controleer de Safety Snap op slijtage. Raadpleeg het instructieblad van de Safety Snap voor inspectierichtlijnen.
- Controleer de kabel op slijtage. Stop het gebruik direct als er rafeling optreedt, totdat reparatie heeft plaatsgevonden.

Opslag

- Bewaar buiten direct zonlicht.
- Bewaar op een plaats die niet toegankelijk is voor cliënten zonder de juiste begeleiding.

Reiniging

- Raadpleeg uw afdeling infectiepreventie voordat u deze procedures toepast.
- Controleer eerst of de cliënt geen allergieën heeft.
- Vinyl kan worden afgenomen met een vochtige doek en water met zeep of een desinfectiemiddel. Goed laten drogen vóór gebruik.

7. Veiligheid

De veiligheid van uw cliënten is afhankelijk van het zorgvuldig kiezen van activiteiten die aansluiten bij, maar ook een uitdaging vormen voor hun fysieke mogelijkheden.

Gebruik altijd de juiste opvang- en veiligheidstechnieken. Daarnaast zijn de indeling van de ruimte, een correcte installatie en regelmatig onderhoud van uw apparatuur van cruciaal belang.

Southpaw-apparatuur is niet bedoeld voor recreatief of buitengebruik. Onder geen beding mag deze apparatuur worden gebruikt zonder toezicht.

Dit document dient slechts als voorbeeld en vervangt op geen enkele manier de lokale, provinciale, nationale of internationale veiligheidsnormen. Houd er rekening mee dat het uw verantwoordelijkheid is om alle relevante veiligheidsinformatie te verzamelen die van toepassing is op uw locatie.

