



1. Naam van het product

Southpaw acrobatenschommel

2. Product code

21009065

3. Korte omschrijving

De Acrobat Schommel is een uniek en veelzijdig hulpmiddel dat speciaal is ontworpen voor sensorische stimulatie, motorische training en ontspanning. Dankzij de verschillende ophangmogelijkheden kan de schommel steeds op een andere manier worden ingezet, afgestemd op de behoefte van de gebruiker.

4. Inhoud

- 1x acrobatenschommel
- 1x onderhoudschecklist
- 1x instructieblad veiligheidssluiting

Werklast: 45 kg per laag / 181 kg totaal.

5. In gebruik nemen

De Southpaw acrobatenschommel kan op verschillende manieren worden opgehangen:

1. Alle vier de hoeken kunnen aan één ophangpunt worden bevestigd, zoals bij een netschommel. *Let op: door de rekbaarheid van de stof is hiervoor een hoog plafond nodig.*
2. Hij kan als een hangmat aan twee punten worden opgehangen.
3. Hij kan met twee punten aan de ene kant en één punt aan de andere kant worden bevestigd, in een driehoek-configuratie.
4. Elke hoek kan aan een eigen oogbout worden bevestigd.

Belangrijk: Gebruik de Acrobat Schommel niet terwijl u voorwerpen bij zich heeft die de stof kunnen beschadigen, zoals een potlood of kam. Ga bovendien niet direct op de gestikte zoom zitten, omdat dit de naden kan laten scheuren.

Waarschuwing: Het niet correct installeren van een gesmede stalen oogbout (1/2" of 5/8") kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Neem bij vragen over de installatie van de gesmede stalen oogbout contact op met ons.

U kunt de Southpaw acrobatenschommel op verschillende manieren gebruiken, voor uiteenlopende therapeutische doelen.

Om de schommel in een van de hierboven genoemde configuraties op te hangen, bevestigt u eenvoudig een **Southpaw ophangstelsel - knipslot (13799652)** aan elke webbinglus in de hoeken van de schommel en vervolgens het knipslot aan het ophangpunt.

Wanneer u meer dan één hoek aan één oogbout wilt bevestigen, koppelt u die webbinglussen samen aan hetzelfde knipslot. Een **Southpaw ophangstelsel - hoogteversteller (13626652)** kan nodig zijn om een of meer hoeken op de juiste hoogte af te stellen voor de activiteit of cliënt.





Wanneer alle vier de hoeken van de schommel aan één ophangpunt worden bevestigd, moet altijd een **Southpaw ophangstelsel - draaikoppeling (13738652)** worden gebruikt.

Let op: De gebruiker kan hulp nodig hebben bij het in- en uitstappen van de schommel.

Ruimtevereisten:

Houd altijd minimaal **1,8 meter vrije ruimte** aan tussen de schommel en muren of andere obstakels.

Met de juiste begeleiding kan de schommel echter ook worden geplaatst in combinatie met andere materialen, zodat er motorische activiteiten kunnen worden uitgevoerd waarbij de cliënt van het ene toestel naar de schommel beweegt, of vanuit de acrobatenschommel naar een andere schommel.

De keuze van de activiteit moet altijd worden afgestemd op de ervaring van de therapeut of ouder, en hun vermogen om een uitdagende maar veilige activiteit te bieden.

6. Onderhoud

Controleer maandelijks en noteer op de checklist:

- Controleer de webbing op slijtage, vooral op de plek waar deze tegen de Southpaw ophangstelsel - knipslot schuurt. Bij slijtage: stop het gebruik totdat reparatie heeft plaatsgevonden.
- Controleer de hoeken van de acrobatenschommel. Deze zones zijn kritiek. Als het stiksel loslaat of het Lycra scheurt of uit de hoek trekt: stop het gebruik totdat reparatie heeft plaatsgevonden.
- Controleer de naden op losse of ontbrekende stiksels. Bij schade: stop het gebruik totdat reparatie heeft plaatsgevonden.
- Raadpleeg de andere instructiebladen voor het juiste onderhoud van gerelateerde onderdelen, zoals Southpaw ophangstelsel - knipslot en Southpaw ophangstelsel - draaikoppeling.

Matten – voorzorgsmaatregelen

- Gebruik altijd geschikte valmatten.
- Plaats valmatten en wandmatten bij alle hangende materialen.

Opslag

- Bewaar buiten direct zonlicht.
- Bewaar op een plaats die niet toegankelijk is voor cliënten zonder de juiste begeleiding.

Reiniging

- Raadpleeg uw afdeling infectiepreventie voordat u deze procedures toepast.
- Controleer eerst of de cliënt geen allergieën heeft.
- Machinewas op warm water met mild wasmiddel. Droog op lage temperatuur in de droger.





7. Veiligheid

De veiligheid van uw cliënten is afhankelijk van het zorgvuldig kiezen van activiteiten die aansluiten bij, maar ook een uitdaging vormen voor hun fysieke mogelijkheden.

Gebruik altijd de juiste opvang- en veiligheidstechnieken. Daarnaast zijn de indeling van de ruimte, een correcte installatie en regelmatig onderhoud van uw apparatuur van cruciaal belang.

Southpaw-apparatuur is niet bedoeld voor recreatief of buitengebruik. Onder geen beding mag deze apparatuur worden gebruikt zonder toezicht.

Dit document dient slechts als voorbeeld en vervangt op geen enkele manier de lokale, provinciale, nationale of internationale veiligheidsnormen. Houd er rekening mee dat het uw verantwoordelijkheid is om alle relevante veiligheidsinformatie te verzamelen die van toepassing is op uw locatie.

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

