



1. Naam van het product

Snoezelkar Sense Systeem

2. Product code

21981010

3. Beschrijving

Deze Snoezelkar Sense Systeem wordt uit veiligheids- en serviceoverwegingen geleverd op een pallet.



= Wij raden aan om deze meegeleverde houten transportkist te bewaren voor eventuele servicedoeleinden =

1. Open de pallet voorzichtig.
2. Deblokkeer de remmen van de voorste wieltjes onderaan de Snoezelkar en rijd de kar van de pallet af.
3. Hang de vezelnevel naast de kar neer.
4. Vervolgens is de sleutel te zien, waarmee de voor-en achterzijde van de Snoezelkar geopend kunnen worden. De sleutel is te vinden bovenop de kar
5. Open de lage kastdeur aan de voorzijde van de Snoezelkar
6. Neem de beamer en de LED Lichtspot en laserstar uit de kast en plaats deze op de kar.
7. Sluit de tablet aan op de beamer doormiddel van de meegeleverde HDMI-kabel.
8. De tablet verbindt zich automatisch met de bluetooth controller
9. Verbind de lichtspot aan de bovenzijde van de kar aan op de dikke zwarte kabel.
10. Neem de 3 meter lange stroomkabel uit de kast en plaats één zijde van deze stroomkabel in de aansluiting aan de buitenzijde van de Snoezelkar (rechtterkant vanuit de voorzijde gezien) en plaats de andere zijde van de stroomkabel in het stopcontact in de ruimte waar de Snoezelkar gebruikt zal worden.
11. Neem vervolgens de Adapter (aansluiting t.b.v. de bubbelunit) uit de kast en plaats deze in de andere aansluiting welke te vinden is aan de buitenzijde van de Snoezelkar onder de vezelnevelstreng.
12. Open met de meegeleverde sleutel nu ook de achterzijde van de Snoezelkar. Hier bevindt zich een uitrijbaar gedeelte met de bubbelunit en spiegel aan de achterkant.
13. Plaats het uitrijdbare gedeelte met de bubbelunit naast de Snoezelkar en blokkeer de wieltjes van het uitrijdbare gedeelte voor gebruik.
14. Vul de bubbelunit voor 80% met water, zodat er ook nog ruimte over is voor de bubbels.
15. Prik de andere zijde van de kleine stroomkabel, welke zojuist aan de buitenkant van de Snoezelkar geplaatst is, in de bubbelunit, zodat ook deze van stroom wordt voorzien.





16. Open vervolgens weer de kast aan de voorzijde van de Snoezelkar; in deze lage kast bevindt zich een schakelkast met 6 rode knoppen. Deze knoppen zijn de aan-/ uit knoppen van de elektronische producten en onderdelen die in en op de Snoezelkar gebruikt worden. In het meegeleverde (en onderstaand) schema, staat duidelijk aangegeven welke knop voor welk apparaat is (van links naar rechts).

Let op: Stop altijd eerst de stekker aan de buitenzijde van de Snoezelkar in het stopcontact en zet daarna pas alle rode knoppen aan!

Knop 1 Bubbelunit

Knop 2 Vezelnevel

Knop 3 Tablet + versterker + mini beamer

Knop 4 Star light projector

Knop 5 Spot

Knop 6 Aroma verspreider

17. De Snoezelkar is nu klaar voor gebruik!

4. Zintuigen stimulaties

Voelen, ruiken, horen en zien

5. Specificaties

Afmeting: 60 x 70 x 145 cm

Stroomvoorziening: 220 V

6. Inbegrepen

Alles zoals afgebeeld

- Desinfectietabletten voor bubbelunits 1 – set van 5
- Extra oliepatroon voor aromaverspreider
- Nenko LED lichtbron voor vezelnevel
- Geurensset met 4 oliegeurmengsels
- Muurbeugel sense scherm
- Beamersteun

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be



