



1. Naam van het product

Snoezelkar Sense Systeem 2.0

2. Product code

21971010

3. Kleur

Zoals afgebeeld

4. Beschrijving

Deze Snoezelkar Sense Systeem wordt uit veiligheids- en serviceoverwegingen geleverd in een houten transportkist.

= Wij raden aan om deze meegeleverde houten transportkist te bewaren voor eventuele servicedoelinden =

1. Open de transportkist met een kruiskopschroevendraaier.
2. Deblokkeer de remmen van de voorste wieltjes onderaan de Snoezelkar en rijd de kar uit de transportkist.
3. Hang de vezelnevel naast de kar neer.
4. Vervolgens is de sleutel te zien, waarmee de voor-en achterzijde van de Snoezelkar geopend kunnen worden. De sleutel van de Snoezelkar is te vinden in de handgreep van het lage deurtje, deze is vastgemaakt met een tie-wrap.
5. Open de lage kastdeur aan de voorzijde van de Snoezelkar met de meegeleverde sleutel.
6. Neem de beamer en de LED Lichtspot uit de kast en plaats deze op de kar.
7. Sluit de tablet aan op de beamer doormiddel van de meegeleverde HDMI-kabel.
8. Verbind de tablet met de Nenko mini versterker of de normale Nenko versterker doormiddel van de bijgeleverde audiokabel.
9. De tablet verbindt zich automatisch met de bluetooth controller (indien de controller aan staat (dus in het stopcontact)) als je de Nenko app opstart.
10. Verbind de lichtspot aan de bovenzijde van de kar aan op de dikke zwarte kabel.
11. Sluit daarna de speakers aan op de beamer doormiddel van het meegeleverde kabeltje. De aansluitingen spreken voor zich.
12. Neem de 3 meter lange stroomkabel uit de kast en plaats één zijde van deze stroomkabel in de aansluiting aan de buitenzijde van de Snoezelkar (rechtterkant vanuit de voorzijde gezien) en plaats de andere zijde van de stroomkabel in het stopcontact in de ruimte waar de Snoezelkar gebruikt zal worden.
13. Neem vervolgens de Adapter (aansluiting t.b.v. de bubbelunit) uit de kast en plaats deze in de andere aansluiting welke te vinden is aan de buitenzijde van de Snoezelkar onder de vezelnevelstreng.
14. Open met de meegeleverde sleutel nu ook de achterzijde van de Snoezelkar. Hier bevindt zich een uitrijbaar gedeelte met de bubbelunit en spiegel aan de achterkant. Dit houten "paneel" is er eenvoudig uit te wippen door deze zachtjes aan het handvat naar achteren te trekken. Om het meubel met de bubbelunit makkelijk achter in de snoezelkar te kunnen schuiven, duw je met je voet op het plankje aan de achterkant van dit meubel zodat het iets naar achter helt en rijdt het zo helemaal tot achter in de kar en laat het dan weer terugzakken, zodat het makkelijk in het snoezel meubel past.





15. Plaats het uitrijdbare gedeelte met de bubbelunit naast de Snoezelkar en blokkeer de wielletjes van het uitrijdbare gedeelte voor gebruik.
16. Vul de bubbelunit voor 80% met water, zodat er ook nog ruimte over is voor de bubbels.
17. Prik de andere zijde van de kleine stroomkabel, welke zojuist aan de buitenkant van de Snoezelkar geplaatst is, in de bubbelunit, zodat ook deze van stroom wordt voorzien.
18. Open vervolgens weer de kast aan de voorzijde van de Snoezelkar; in deze lage kast bevindt zich een schakelkast met 6 rode knoppen. Deze knoppen zijn de aan-/ uit knoppen van de elektronische producten en onderdelen die in en op de Snoezelkar gebruikt worden. In het meegeleverde (en onderstaand) schema, staat duidelijk aangegeven welke knop voor welk apparaat is (van links naar rechts).

Let op: Stop altijd eerst de stekker aan de buitenzijde van de Snoezelkar in het stopcontact en zet daarna pas alle rode knoppen aan!

- Knop 1 Bubbelunit
- Knop 2 Vezelnevel
- Knop 3 Tablet + Bluetooth dongel
- Knop 4 Mini-beamer + speakers
- Knop 5 Led strips
- Knop 6 spot

19. De Snoezelkar is nu klaar voor gebruik!

5. Zintuigen stimulaties

Voelen, ruiken, horen en zien

6. Specificaties

Afmeting: 65 x 60 x 147 cm
Stroomvoorziening: 220 V

7. Inbegrepen

- 1 x Tablet met bevestiging
- 1 x Beamer
- 1 x Bluetooth controller
- 1 x LED Lichtspot
- 1 x Bubbelunit
- 1 x Vezelnevelstreng
- 1 x Lichtbron voor Vezelnevel
- 1 x Speaker set