

1. Naam van het product

Southpaw zwaaititje

2. Product code

29154065



3. Korte omschrijving

De Southpaw Sling Seat is speciaal ontwikkeld om comfort en ondersteuning te bieden tijdens therapeutische activiteiten. Waar traditionele beenlussen soms als onprettig of beperkend worden ervaren, geeft deze brede zitting cliënten juist meer ruimte en stabiliteit.

4. Inhoud

- 1 x Zitje met bevestigde touwen – werklust: 181 kg (400 lbs)
- 1 x Instructieblad – houd minimaal 1,83 m (6 ft) afstand tot muren en andere obstakels
- 1 x Onderhoudschecklist

5. In gebruik nemen

Minimale vereiste hoogte en ruimte: 2,44 m (8 ft)

Waarschuwing:

Het niet correct installeren van een gesmeed stalen oogbout (1/2" of 5/8") kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.

Als u vragen heeft over de installatie van de gesmede stalen oogbout, neem dan contact met ons op.

Ophanginstructies

- Om het Southpaw zwaaititje op te hangen, gebruikt u een Southpaw ophangstelsel - knipslot (**13799652**) om deze aan het ophangpunt te bevestigen.
- Voor eenvoudig verstellen wordt het gebruik van de Southpaw ophangstelsel – hoogteversteller (**13626652**) aangeraden.
- Wanneer er sprake is van draaibeweging, is Southpaw ophangstelsel - draaikoppeling (**13738652**) vereist.

6. Onderhoud

Controleer maandelijks en noteer op de checklist:

- Controleer op rafels van de touwlussen bij de knipsloten. Controleer ook de knipsloten op slijtage. (knipsloten niet inbegrepen).
- Controleer of splice locks* op de touwen los of ontbrekend zijn. Stop het gebruik als de touwen rafelig zijn of splice locks los of verdwenen zijn.
- Controleer op losse of ontbrekende stiksels. Stop het gebruik als losse of ontbrekende stiksels worden gevonden.

* *Splice locks zijn de nietjes in het touw bij het uiteinde.*

Opslag

- Buiten direct zonlicht bewaren
- Uit de buurt van chemicaliën en schoonmaakmiddelen
- Niet toegankelijk voor cliënten zonder toezicht
- Niet op de rand opslaan (beschadigt rand)



Reiniging

- Controleer eerst of cliënten allergieën hebben. Raadpleeg uw afdeling infectiepreventie voordat u deze procedures toepast.
- Kan met de hand worden gewassen in milde zeep. Niet bleken. Laten drogen door op te hangen.

7. Veiligheid

De veiligheid van uw cliënten is afhankelijk van het zorgvuldig kiezen van activiteiten die aansluiten bij, maar ook een uitdaging vormen voor hun fysieke mogelijkheden.

Gebruik altijd de juiste opvang- en veiligheidstechnieken. Daarnaast zijn de indeling van de ruimte, een correcte installatie en regelmatig onderhoud van uw apparatuur van cruciaal belang.

Southpaw-apparatuur is niet bedoeld voor recreatief of buitengebruik. Onder geen beding mag deze apparatuur worden gebruikt zonder toezicht.

Dit document dient slechts als voorbeeld en vervangt op geen enkele manier de lokale, provinciale, nationale of internationale veiligheidsnormen. Houd er rekening mee dat het uw verantwoordelijkheid is om alle relevante veiligheidsinformatie te verzamelen die van toepassing is op uw locatie.

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

