



1. Naam van het product

Southpaw Nestelschommel senior

2. Product code

29353065

3. Kleur

Zoals afgebeeld



4. Korte omschrijving

De Southpaw Cuddle Swing is een veelzijdige en effectieve schommel die diepe druk en vestibulaire stimulatie biedt. Gemaakt van zacht, rekbaar nylon mesh in combinatie met duurzaam Cordura®-materiaal, vormt de schommel een comfortabele en ondersteunende plek waarin gebruikers volledig tot rust kunnen komen.

5. Inhoud

1x Nestelschommel

1x Southpaw ophangstelsel – knipslot

1x Handleiding

1x Onderhoudschecklist

6. In gebruik nemen

Bevestig eerst het meegeleverde Southpaw Veiligheidsknipslot (13799652) aan de lus bovenop de schommel. Klik daarna dit knipslot vast aan het ophangpunt in het plafond.

Indien nodig kunt u een Southpaw Hoogteversteller (13626652, niet inbegrepen) gebruiken om de schommel op de juiste hoogte voor de cliënt af te stellen. Voor rotatie-activiteiten is het verplicht een Southpaw Draaikoppeling (13738652, niet inbegrepen) te gebruiken.

De Nestelschommel biedt volledige en gelijkmatige ondersteuning voor de cliënt die in de schommel zit. Houd er rekening mee dat de cliënt hulp nodig kan hebben bij het in- en uitstappen.

RUIMTEVEREISTEN: Zorg ervoor dat er minimaal 1,80 meter vrije ruimte is tot muren en andere obstakels.

Onderhoudschecklist:

Alle onderstaande slijtagepunten moeten maandelijks worden gecontroleerd en genoteerd op de meegeleverde checklist.

- Controleer de lus op slijtage op het punt waar deze tegen het Veiligheidsknipslot schuurt. Indien slijtage wordt vastgesteld: direct stoppen met gebruik totdat reparatie heeft plaatsgevonden.
- Controleer de naden op losse of ontbrekende steken. Indien losse of ontbrekende steken worden vastgesteld: direct stoppen met gebruik totdat reparatie heeft plaatsgevonden.

Matinstructies:

- Gebruik altijd geschikte valmatten en wandmatten bij hangend materiaal.



**Opslag:**

- Buiten bereik van cliënten bewaren zonder toezicht.
- Beschermen tegen direct zonlicht.

Reinigingsinstructies:

- Raadpleeg eerst de afdeling infectiepreventie voordat u deze procedures toepast.
- Controleer vooraf of cliënten allergieën hebben.
- Machinewas in warm water met mild wasmiddel. Drogen in de droogtrommel op lage temperatuur.

7. Onderhoud

- Raadpleeg indien nodig je infectiepreventie-afdeling.
- Controleer eerst op allergieën bij cliënten.
- Machinewas in warm water met mild wasmiddel.
- Drogen op lage temperatuur in de droger.
- Waarschuwing: Onjuist installeren van een stalen oogbout ($\frac{1}{2}$ " of $\frac{5}{8}$ "") kan leiden tot ernstig letsel of overlijden. Neem bij twijfel contact op met ons.

8. Veiligheid

De veiligheid van uw cliënten is afhankelijk van het zorgvuldig kiezen van activiteiten die aansluiten bij, maar ook een uitdaging vormen voor hun fysieke mogelijkheden.

Gebruik altijd de juiste opvang- en veiligheidstechnieken. Daarnaast zijn de indeling van de ruimte, een correcte installatie en regelmatig onderhoud van uw apparatuur van cruciaal belang.

Southpaw-apparatuur is niet bedoeld voor recreatief of buitengebruik. Onder geen beding mag deze apparatuur worden gebruikt zonder toezicht.

Dit document dient slechts als voorbeeld en vervangt op geen enkele manier de lokale, provinciale, nationale of internationale veiligheidsnormen. Houd er rekening mee dat het uw verantwoordelijkheid is om alle relevante veiligheidsinformatie te verzamelen die van toepassing is op uw locatie.

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

