



1. Naam van het product

Schommelkuip met abductie groot - compleet

2. Product code

72012065

3. Kleur

Zoals afgebeeld.



4. Korte omschrijving

Onze bekroonde Full Support Swing Seats zijn al generaties lang een favoriet van kinderen, tieners en volwassenen! Schommelen is de perfecte vestibulaire activiteit en kan helpen om input te leveren voor een reeks van sensorische verwerkingsstoornissen.

Deze schommelzitjes zijn inmiddels een begrip in de zorg, vele malen nagemaakt, maar nooit geëvenaard. Ideaal voor thuis of in een verzorgingsinstelling. Weer- en windbestendig en standaard geleverd met 5-punts fixatie om veilig en onbezorgd te kunnen schommelen. De kuip is gemaakt van hoogwaardig polyethyleen en volledig voorgevormd met abductie. De meegeleverde touwen zijn lang genoeg voor schommelstellingen van 2,5 meter hoog en voorzien van knipsloten voor 2-punts ophanging. De touwen zijn UV-gestabiliseerd en lang genoeg voor 3 meter 'hoge frames' of je kunt de stoel op twee verbindingpunten bevestigen met behulp van de ophanghaken.

Volwassen zitplaats met volledige ondersteuning 81 cm (hoogte van de stoel) x 51 cm (breedte van de stoel) x 36 cm (diepte van de stoel) leeftijdscategorie volwassene tot max. 125 kg (72012065)

Zithoogte 81 cm, zitbreedte 51 cm, zitdiepte 36 cm

Gebruikt door ouders en professionals
Geschikt voor binnen en buiten gebruik.
Voorzien van UV-bestendige zitting



Altijd gebruiken onder toezicht

6. Onderhoud


- Onderhoud moet snel na installatie en met regelmatige tussenpozen worden uitgevoerd;
- Vervang defecte onderdelen - wij hebben onderdelen;
- Controleer bewegende delen – met name het oranje lager;
- Controleer op verslechtering en schade;
- Controleer of de bouten goed vast zitten;
- Controleer op scherpe randen.




7. Inhoud

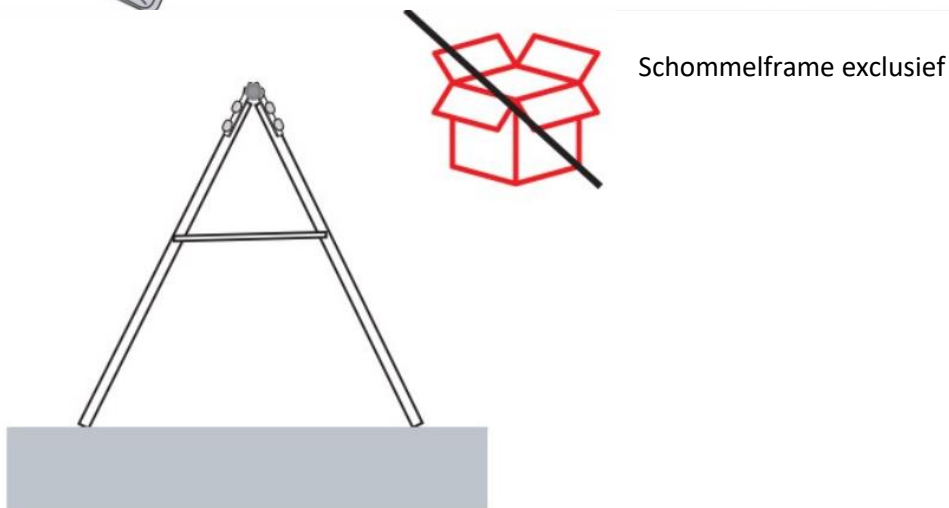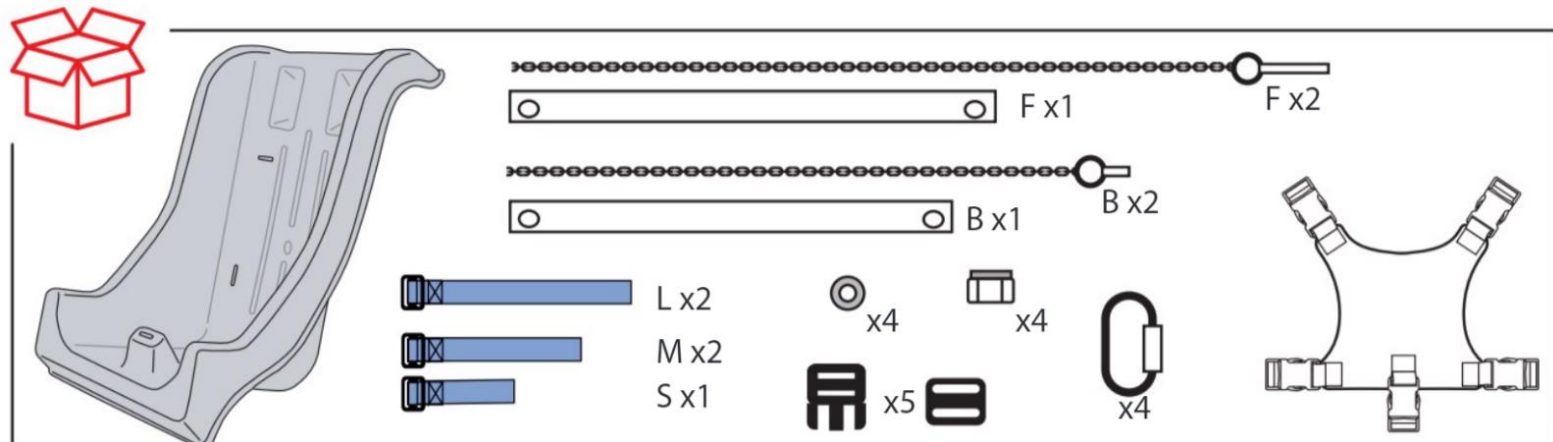


8. In gebruik nemen

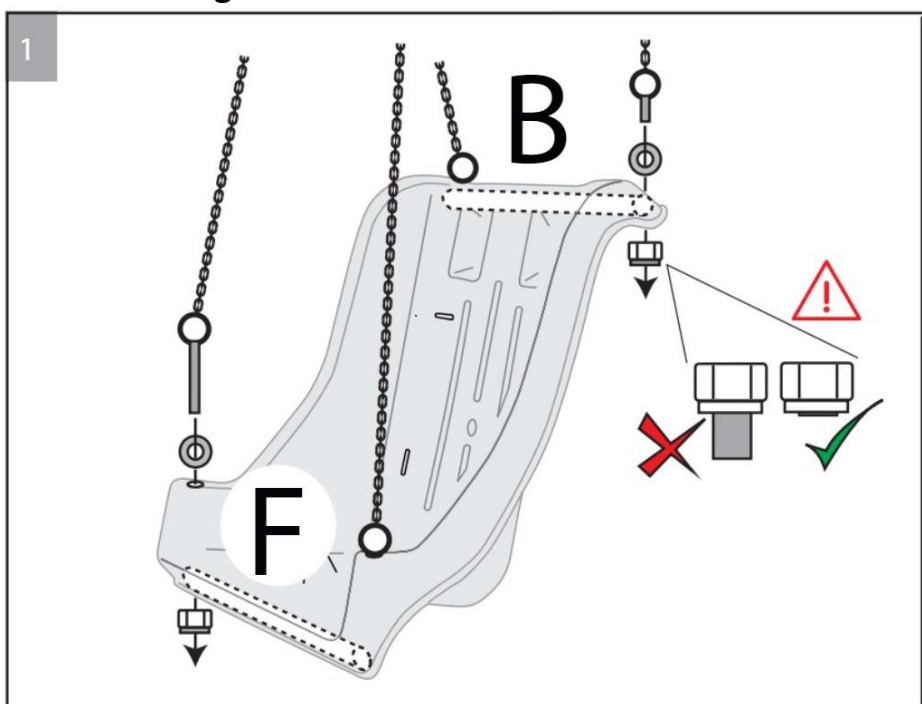


2

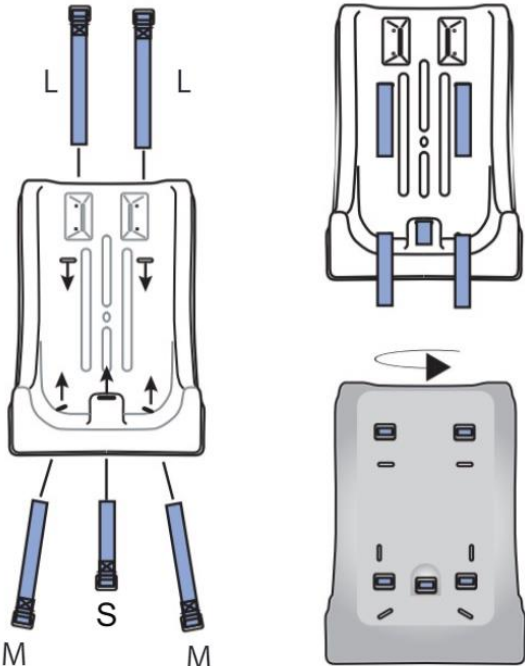


3 x5

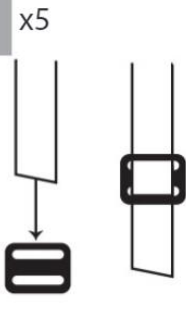


4 x5

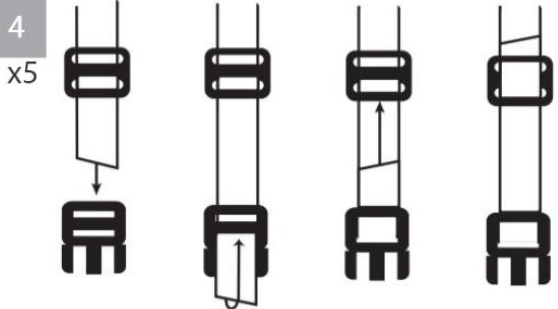


5

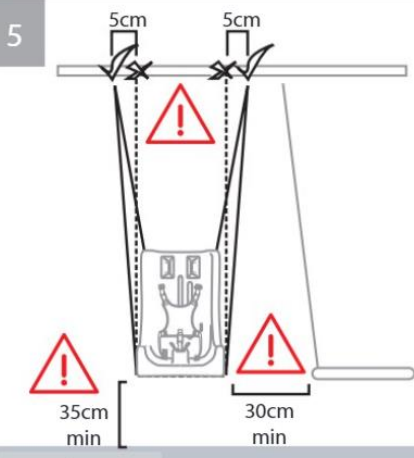


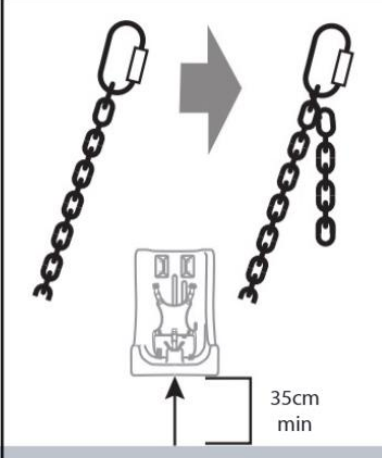


6

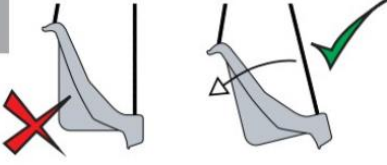



Aanpassen om achterover te leunen

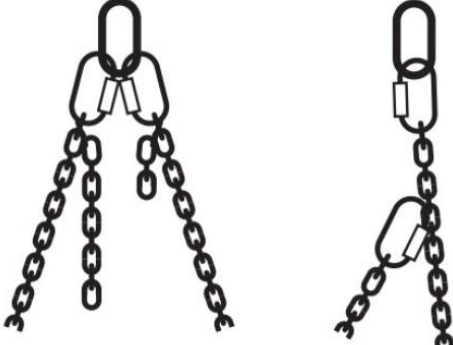



Til op tot in de lucht



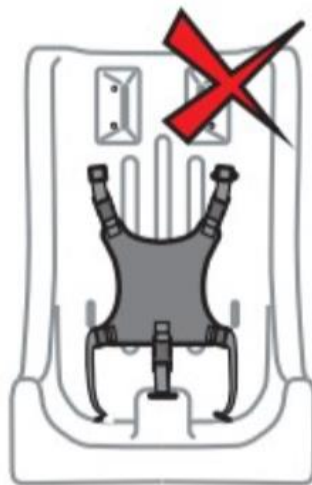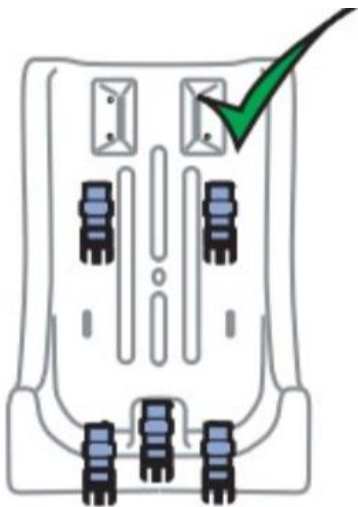

Fixatie vestje verwijderen wanneer niet in gebruik

Bekijk het filmpje op de website voor montage.